

**ZDALNY
MONITORING**

-OFERTA

Medtronic
Further, Together

OŚWIADCZENIE FIRMY MEDTRONIC

Proszę poświęcić chwilę czasu na zapoznanie się z poniższymi oświadczeniami firmy Medtronic.

Niniejsza prezentacja została przygotowana wyłącznie dla ogólnych celów edukacyjnych i nie powinna być traktowana jako wyłączone źródło tego typu informacji. To szkolenie nie zmienia ani nie zastępuje zaakceptowanego etykietowania. Zawartość będzie udostępniona lekarzom i innym pracownikom medycznym, którzy chcą pogłębić zrozumienie zasady działania i wykorzystania produktów i terapii firmy Medtronic z zamiarem zwiększania ich wiedzy o cechach i działaniu opisanemu w instrukcji obsługi. Przypadki pacjentów zawarte w tym materiale są fikcyjne i zostały przygotowane wyłącznie do celów edukacyjnych. Za każdym razem, odpowiedzialnością lekarza jest wypracowanie niezależnej oceny klinicznej w każdym indywidualnym przypadku. Zmiany w stanie klinicznym pacjenta i/lub przyjmowanych lekach mogą zmieniać skuteczność zaprogramowanych parametrów lub funkcji, a wyniki mogą być inne. Działanie urządzenia i jego programowanie przedstawione w tym materiale jest oparte o produkty firmy Medtronic i są opisane we właściwych opublikowanych instrukcjach obsługi.

manuals.medtronic.com

ZDALNY MONITORING BIEŻĄCA OFERTA

TELEMETRIA BEZPRZEWODOWA (ICD, CRT-D, LINQ, PLATFORMA BLUESYNC)



MYCARELINK

TELEMETRIA PRZEWODOWA (IPG & CRT-P)



MYCARELINK

MYCARELINK
SMART


ZDALNY MONITORING

NASTĘPNY KROK

Bluetooth



Przewodowa telemetria

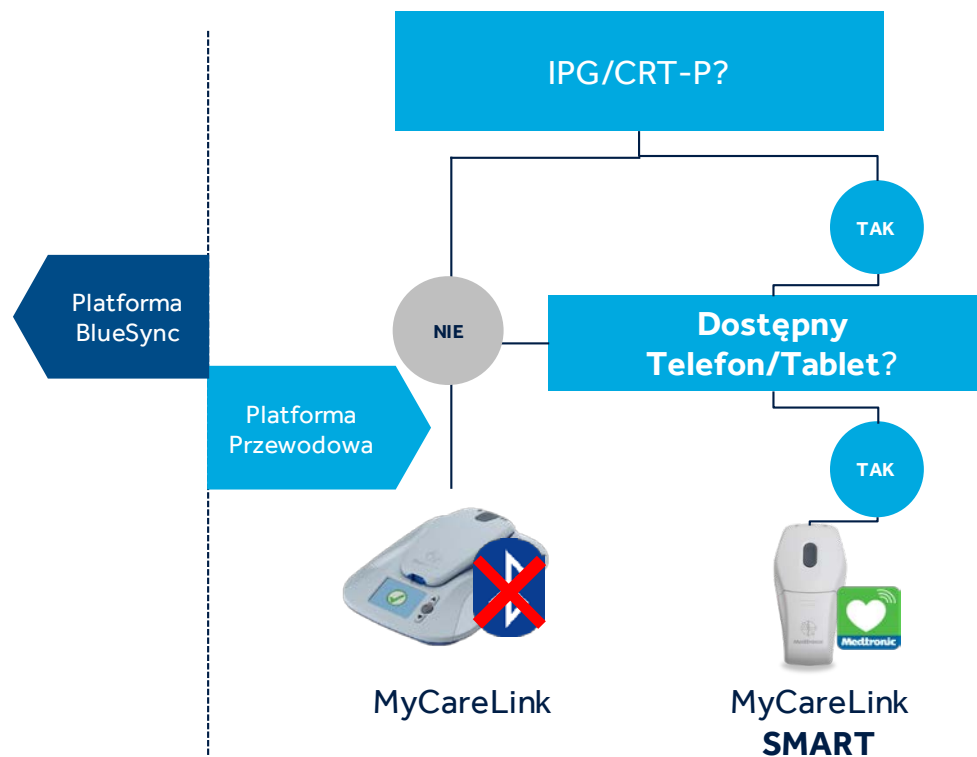

MONITOR MYCARELINK™



Medtronic
Further, Together

MONITOR MYCARELINK™



Prosty.

Ekran LCD wyświetla instrukcje postępowania krok po kroku oraz potwierdza wysłanie transmisji.



Połączony.

Wystarczy podłączyć monitor do źródła zasilania i zapewnić dostęp do sygnału sieci komórkowej.



Globalny.

Rozbudowana technologia sieci komórkowej pozwala na łączenie się niemal z każdego miejsca świata.




Współpracuje
ze wszystkimi
urządzeniami
kompatybilnymi
z systemem
firmy
MEDTRONIC

BAZA MONITORA

WŁAŚCIWOŚCI EKRANU

- Funkcja wygaszania ekranu w przypadku braku aktywności monitora.
- Uniesienie czytnika lub naciśnięcie przycisku „START” spowoduje wybudzenie monitora.
- Duży, czytelny ekran z niezbędnymi informacjami dla pacjenta.

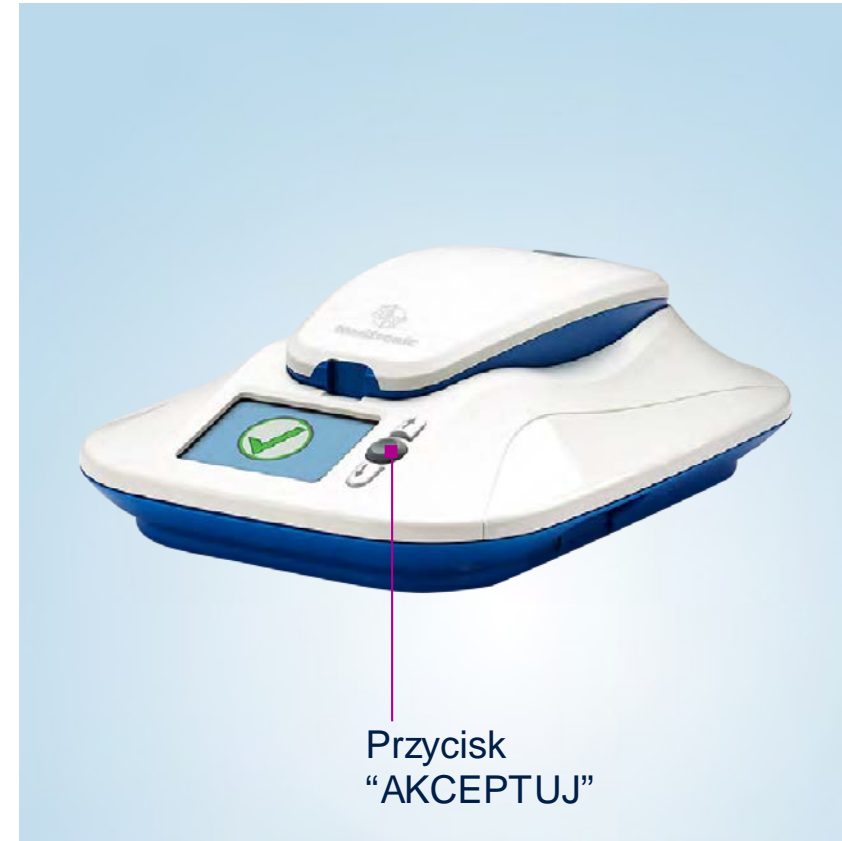

CZYTNIK PACJENTA

ZIELONY wskaźnik

- Urządzenia przewodowe: czytnik przesyła dane do bazy monitora
- Urządzenia bezprzewodowe: normalnie wyłączony, również w czasie transmisji

Odpowiednik przycisku „AKCEPTUJ” na bazie monitora.



NIEBIESKI wskaźnik

- Miga — czytnik nawiązuje połączenie z bazą monitora
- Świeci — czytnik i baza monitora są połączone

BURSZTYNOWY wskaźnik

Wskazuje niski poziom naładowania baterii czytnika

MONITOR

**MYCARELINK™
SMART**



Medtronic
Further, Together

MONITOR MYCARELINK SMART™ DLA PACJENTÓW Z URZĄDZENIAMI IPG/CRT-P

- Zmiana w kierunku technologii zarządzanej przez pacjentów, z której korzystają na codzień




- Pierwszy **osobisty** monitor pacjenta
 - Różnorodne opcje łączności
 - Prosty w obsłudze
 - Przenośny



MONITOR MYCARELINK SMART™




Czytnik Pacjenta
Zasilany baterią

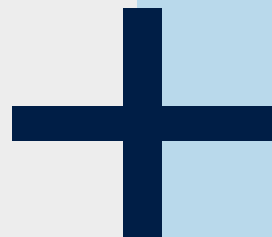

Aplikacja MyCareLink Smart™
Urządzenia Apple lub Android


JAK TO DZIAŁA?

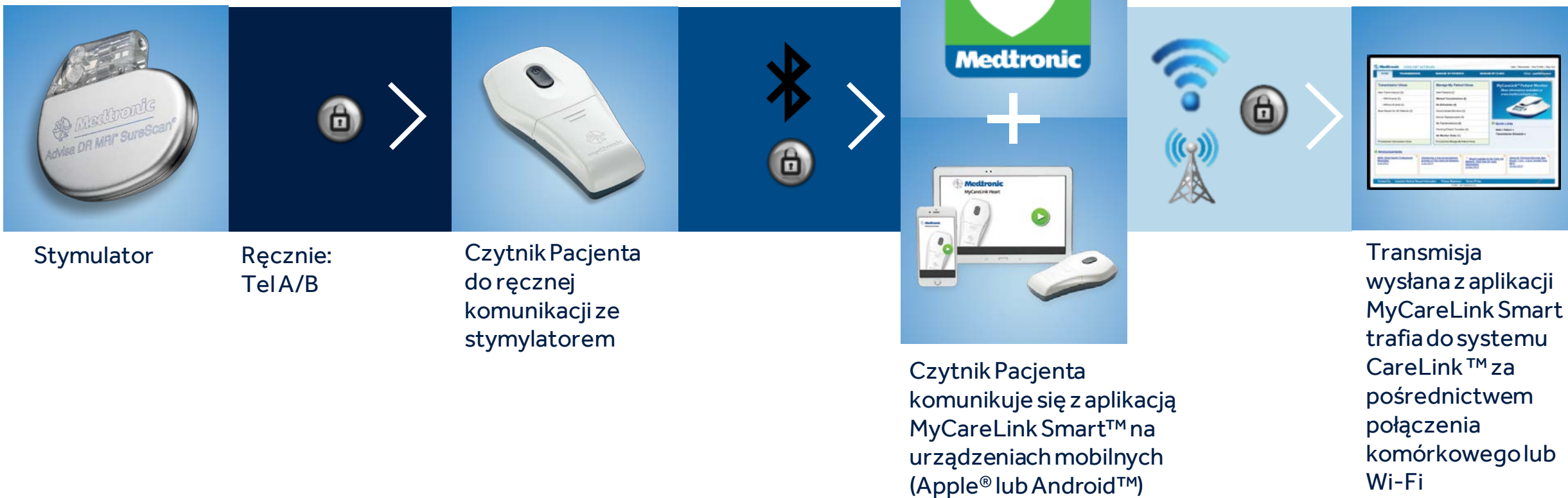

KONFIGURACJA MONITORA

1 Pobierz aplikację na urządzenie mobilne

www.mycarelinksmart.com

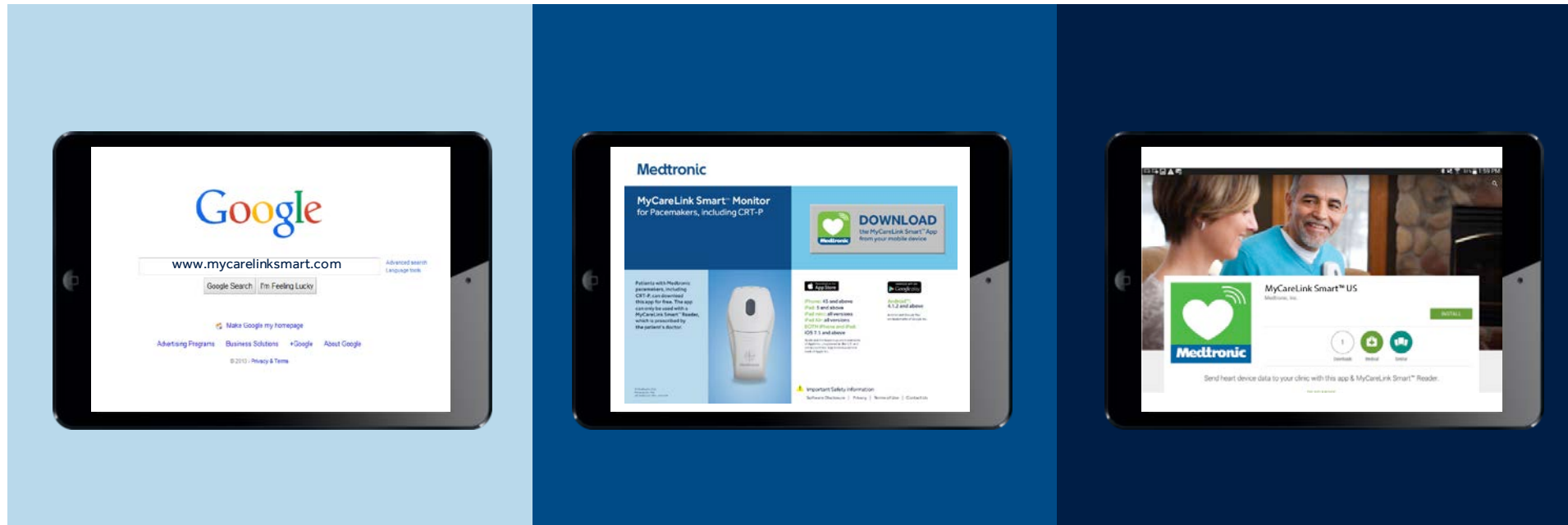


KONFIGURACJA MONITORA

2 Sparuj czytnik pacjenta z urządzeniem mobilnym



KONFIGURACJA MONITORA

3 Wyślij transmisję

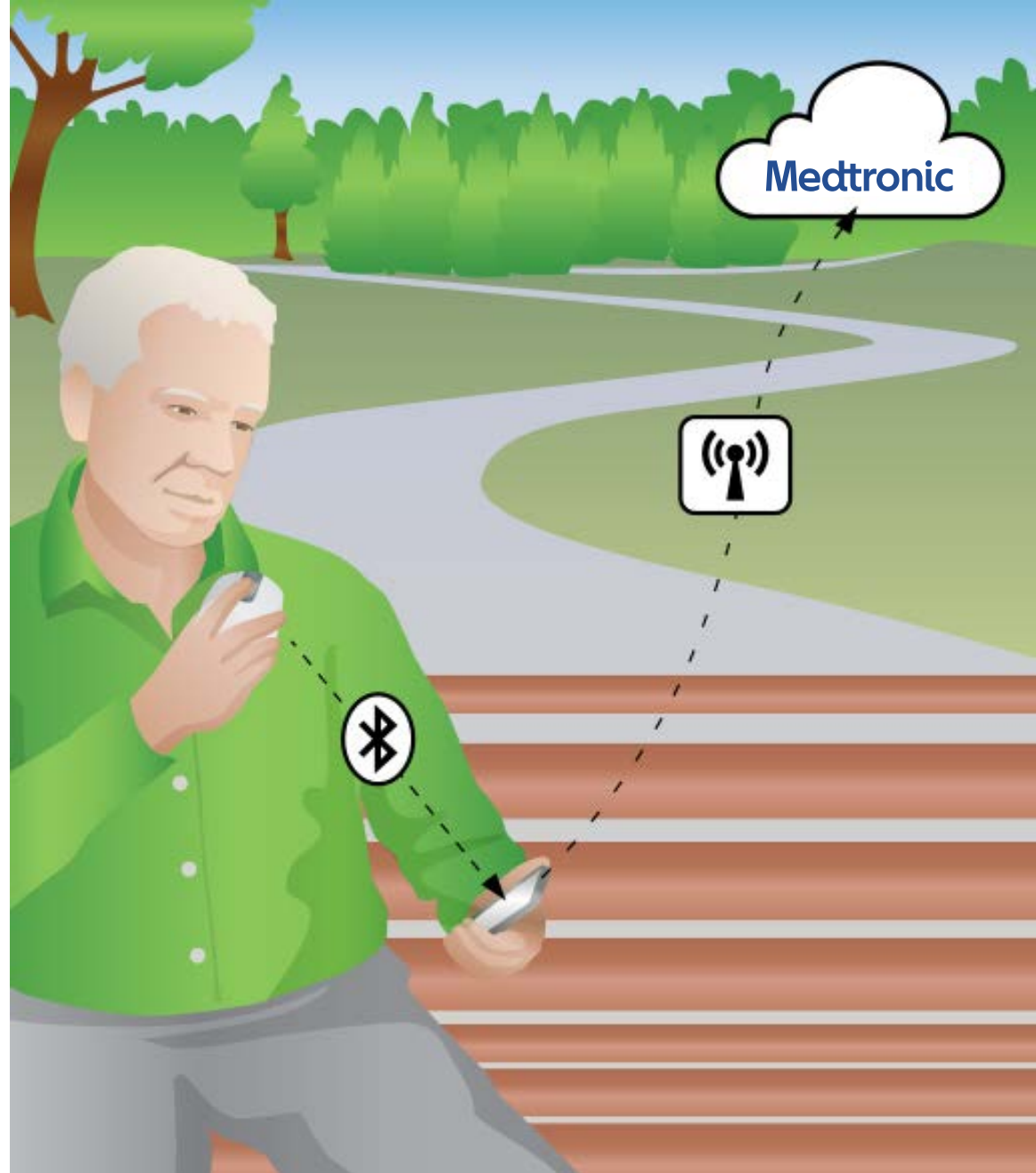

WSKAZANIA, BEZPIECZEŃSTWO I OSTRZEŻENIA

Szczegółowe informacje na temat instrukcji użytkowania, procedury implantacji, wskazań, przeciwwskazań, ostrzeżeń, środków ostrożności i potencjalnych zdarzeń niepożądanych można znaleźć w instrukcji obsługi urządzenia. Jeśli używasz urządzenia MRI SureScan®, zapoznaj się z instrukcją techniczną MRI SureScan® przed wykonaniem rezonansu magnetycznego. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z lokalnym przedstawicielem firmy Medtronic i/lub odwiedź stronę internetową medtronic pod adresem medtronic.eu.

Zapoznaj się z instrukcjami użytkowania na manuals.medtronic.com. Podręczniki można przeglądać za pomocą bieżącej wersji dowolnej głównej przeglądarki internetowej. Aby uzyskać najlepsze wyniki, należy użyć programu Adobe Acrobat® Reader.

Ważne przypomnienie: Informacje te są przeznaczone wyłącznie dla użytkowników na rynkach, na których produkty i terapie firmy Medtronic są zatwierdzone lub dostępne do użytku zgodnie z instrukcjami obsługi produktu. Treści dotyczące konkretnych produktów i terapii Firmy Medtronic nie są przeznaczone dla użytkowników na rynkach, którzy nie posiadają zezwolenia na stosowanie.

Medtronic

Europe
Medtronic International Trading Sàrl
Route du Molliau 31
Case postale
CH - 1131 Tolochenaz
Telephone: +41 (0)21 802 70 00
Fax: +41 (0)21 802 79 00

Medtronic Poland Sp. z o.o.
Polna 11
00-633 Warsaw
Tel: 48 22 4656900
Fax: 48 22 4656917

Medtronic, Medtronic logo, and Further, Together are trademarks of Medtronic. The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Medtronic is under license. ™Other third party brands are trademarks of their respective owners. All other brands are trademarks of a Medtronic company. Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. App Store is a service mark of Apple Inc.

medtronic.eu

UC202006343 PO ©2020
Medtronic. All Rights Reserved.